

PRESTIGE® putty soft

ist ein Additionssilikon
für hochpräzise Gebissabdrücke.
Nur für den professionellen Gebrauch.



- ✓ Fast set
- ✓ Besonders geschmeidige Verarbeitung
- ✓ Kurze Mundverweildauer
- ✓ Härte: 60 Shore-A
- ✓ Präzise Detailwiedergabe
- ✓ Hohe Dimensionsstabilität

Anwendungsbereich

PRESTIGE® putty soft eignet sich für die Abnahme von Zahnabdrücken jeder Art: routinemäßige zahnärztliche Abdrücke, Reproduktion von Zahnersatz, kieferorthopädische Vorrichtungen, Studienmodelle etc.

Anwendung

Nehmen Sie die 2 Komponenten (Base und Katalysator) mit den farbcodierten Dosierlöffeln aus den Behältern.

Das Mischungsverhältnis von Base zu Katalysator beträgt 1:1.

Mischen Sie die beiden Komponenten, bis eine gleichmäßig gefärbte Masse entsteht.

ACHTUNG:

- Die Aushärtezeit wird beschleunigt, wenn die Base und der Katalysator vor dem Mischvorgang einzeln geknetet werden.
- Verschließen Sie die Behälter sofort nach Gebrauch.
- Verwenden Sie nur die farbcodierten Messlöffel und Deckel der entsprechenden Komponenten.
- Von der Verwendung von Latexhandschuhen wird abgeraten.
- Die mit **PRESTIGE® putty soft** hergestellten Abdrücke können in galvanischen Bädern versilbert oder verkupfert werden.

Desinfektion des Abdrucks

Nachdem der Abdruck genommen wurde, muss dieser von Ablagerungen und Speichel gereinigt werden. Durch das Einlegen des Abdrucks in eine 2% ige Glutaraldehydlösung, eine 0,5% ige Natriumhypochloritlösung oder durch Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel, kann der Abdruck sterilisiert werden.

Ein Abdruck kann für ca. 30 Min. - 1 Std. eingelegt werden, ohne dass es zu Verformungen des Abdrucks kommt. Hierbei sind die jeweiligen Herstellerangaben genau zu befolgen.

Wichtig:

Bevor der zweite Abdruck genommen wird, ist es wichtig den ersten Abdruck zu reinigen und zu trocknen. Nur so kann eine perfekte Haftung zwischen den beiden Abdrücken gewährleistet werden.

Gießvorgang

Warten Sie mindestens eine Stunde nach der Polymerisation, bevor Sie den Abdruck ausgießen. Die Dimensionsstabilität des Abdrucks kann bis zu 7 Tage lang anhalten. Die Abformmaterialien aus der Prestige-Produktlinie sind kompatibel mit allen herkömmlichen Gipsen.

Arbeits- und Sicherheitshinweise

- Vermeiden Sie Augen- und Hautkontakt mit dem Katalysator.
- Bei Kontakt mit der Haut waschen Sie den Bereich sorgfältig mit Wasser und Seife.
- Bei Kontakt mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Die Elastomere sind chemisch beständig; daher sollte jeder Kontakt mit Kleidung, einschließlich Laborkitteln, vermieden werden.

Lagerung

Der Abdruck ist bei Raumtemperatur zu lagern. **PRESTIGE® putty soft** hat bei korrekter Lagerung eine Haltbarkeit von 36 Monaten (ab Produktionsdatum). Aufbewahrung in einem hermetisch abgedichteten Behälter bei 4 °C – 28 °C. Von Wärmequellen, Funken oder Flammen fernhalten. Das Haltbarkeitsdatum bezieht sich auf das ungeöffnete Produkt. Die Chargennummer und das Verfallsdatum sind auf allen Einzelverpackungen aufgedruckt. Bei Kontaktaufnahme mit dem Händler ist es wichtig, diese Informationen zur Hand zu haben, um die richtige Produktcharge schnell zu identifizieren.

WICHTIG: Das Produkt nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Verpackungseinheit

2961 - Pkg á 300ml/450g Basen-Paste & 300ml/450g Katalysator-Paste und 2 Dosierlöffeln

Technische Daten / ISO 4823

Anmischzeit*	30 sek.
Verarbeitungszeit*	1 min.
Mundverweildauer*	2 min. 30 sek.
Farbe	orange
ISO 4823	
Mischverhältnis Base:Katalysator	1:1
Elastische Rückstellung	99 %
Härte (Shore)	60 Shore A
Konsistenz	knetbar – Typ 0
Lineare Maßänderung (ca. 24 h)	0,25 %

* Die angegebenen Zeiten beginnen mit dem Mischvorgang des Pulvers bei einer Temperatur von 23 °C. Höhere Temperaturen beschleunigen den Prozess, während niedrigere Temperaturen ihn verlangsamen. Zudem beziehen sich die genannten Zeitangaben auf den Mischvorgang mit destilliertem Wasser. Es gibt jedoch keine nennenswerten Abweichungen bei der Verwendung von Leitungswasser.

VANNINI DENTAL INDUSTRY S.r.l.

Via diCampigliano 55/A- 50012GRASSINA (FI)– ITALYTel. +39055/644698 Fax +39055/644697
E-mail: info@vanninidental.com www.vanninidental.com