

- ✓ Schonende Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten
- ✓ Entfernt schnell Reste von Alginaten, Zinkoxid-Eugenol, Carboxylat- und Phosphatzementen sowie thermoplastische Abformmassen und Wachsen
- ✓ Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar
- ✓ Auch für das Ultraschallbad geeignet

pep tray cleaner

Art-Nr.: 28570

Anwendungsbereiche

Wirkstoffkonzentrat zur schonenden Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten in zahnärztlichen Praxen. Die Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar.

Anwendung

Bei Verschmutzung wird das Konzentrat zu einer 5 – 10 %igen Lösung angesetzt. Die verunreinigten Teile werden in die Gebrauchslösung gelegt und je nach Verschmutzungsgrad mind. 45 min. einwirken lassen. Die Lösung ist auch für die Reinigung im Ultraschallbad geeignet. Der Spezialreiniger ist für nicht-rostende Gegenstände geeignet. Chrom, Nickel- und Aluminiumteile sollten nicht gemeinsam gereinigt werden. Korrosionsgefahr! Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen!

Zusammensetzung und Inhaltsstoffe nach VO 648/2004/EG

5 – 15 % anionische Tenside
 EDTA-Salze
 Duftstoffe

Lieferformen

Pep tray cleaner (Art-Nr.: 28570) 1 l Flasche

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	1,086 g/cm ³
pH-Wert	11,3

Sicherheitshinweise

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
 H315 Verursacht Hautreizungen.
 H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. Behälter dicht verschlossen halten. BEI KON-TAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglich-keit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein GIFTINFOR-MATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife wa-schen. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Ent-sorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.



Gefahr

<p>Hersteller</p> <p>Prisman GmbH Otto-Hahn-Ring 6-18 D-64653 Lorsch</p> <p>Tel.: 06251-866980-0</p>
