

Produktdatenblatt PROPHYPEP



PROPHYPEPTop – PROPHYPEPPerio Plus

PROPHYPEP

Allgemeine Hinweise

PROPHYPEP ist ein Prophylaxe Pulver für die professionelle Zahnreinigung und Biofilm (Plaque)-Entfernung.

Alle Pulver sind besonders fein und gleichmäßig gekörnt. So erzielt man eine selektive Abrasion bei Belägen und arbeitet zugleich schonend für Weichgewebe und Zahnhartsubstanzen.

Anwendungsbereiche / Indikation

PROPHYPEPTop


Der Klassiker für supragingivale Anwendungen entfernt Biofilm (Plaque) und starke Verfärbungen. Bei Bedarf bereiten Sie damit die Zahnoberfläche für verschiedene Behandlungen vor.

PROPHYPEPPERio Plus

Das vielseitige, zeitsparende und nicht kariogene, sowie angenehm schmeckende, Pulver bei der anschließenden Polierung entfallen kann. Sub- und supragingival (Indikationen oberhalb als auch unterhalb des Zahnfleischsaumes) am natürlichen Zahn und an Implantaten anwendbar. **Vielseitigste und effizienteste Behandlung.**

Zusätzliche Indikationen:

- Reinigung von Implantatoberflächen
- Schonende Reinigung in der Kieferorthopädie (z.B. Brackets)
- Reinigung der Zähne vor dem Bleaching

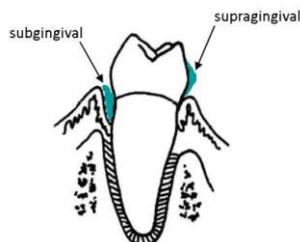

Zusammensetzung

PROPHYPEPTop Natriumhydrogencarbonat Basis
 PROPHYPEPPERio Plus Tagatose Basis

Chemisch-physikalische Daten

Optik: weiße, feine und homogene Pulver definierter Korngröße:

PROPHYPEPTop mediane Korngröße 40 µm
 PROPHYPEPPERio Plus mediane Korngröße 15 µm

Varianten

PROPHYPEPTop Minze, Lemon, Cherry, Cassis
 PROPHYPEPPERio Plus Neutral

Lieferformen

PROPHYPEPTop (Art.Nr: 8000)
 300 g Flasche mit Adapterverschluss
 PROPHYPEPPERio Plus (Art.Nr: 8001)
 120 g Flasche mit Adapterverschluss

Hinweis: 20 g Muster erhältlich! Rufen Sie uns an:
 DE: 0641-952 05-99 AT: 01-470 17 06

PROPHYPEP

Hinweise zur Anwendung

Das entsprechende Pulver je nach Indikation in den Vorratsbehälter des Pulverstrahlgeräts umfüllen. Pulver staubfrei und trocken lagern und nicht mit anderen Pulvern mischen.

PROPHYPEPTop

Beachten Sie die Gebrauchsinformation und maximale Füllhöhe der Gerätehersteller. Nicht für die Entfernung von Belägen oder Konkrementen in Zahnfleischtaschen geeignet, ebenso den Pulverstrahl nicht auf das Zahnfleisch oder sonstige Weichgewebe richten. Freiliegendes Dentin und Schmelzkaries dürfen nicht bestrahlt werden, da hier mit höheren Abrasivwerten zu rechnen ist. Komposit-, Kompomer-, Amalgam- und Goldfüllungen dürfen ebenfalls nicht bestrahlt werden, da es zu Aufrauungen kommen kann. Patienten die an chronischer Bronchitis oder Asthma leiden, dürfen niemals mit einem Pulverstrahlgerät behandelt werden. Patienten mit einer natriumarmen Diät (z.B. Bluthochdruck) sollten nicht mit dem Pulver behandelt werden, da es Natriumhydrogencarbonat enthält. Patienten bei denen ein Allergieverdacht gegenüber Aromastoffen besteht, dürfen nicht mit dem Pulver behandelt werden. Patient und Bediener müssen Augenschutz tragen. Der Bediener muss eine Maske und Handschuhe tragen. Hochleistungs-Absauggerät verwenden. Geben Sie Vaseline auf die Lippen des Patienten. Nur für den zahnärztlichen Gebrauch. Behälter geschlossen halten. Vor Gebrauch gut schütteln!

PROPHYPEPperio Plus

Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformation und maximale Füllhöhe der Gerätehersteller.

- **Subgingivale Anwendung:**
Entfernung von periodontalen Biofilmen.
- **Supragingivale Anwendung:**
Entfernung von supragingivalen Biofilmen und Verfärbungen um den Sulkus.

Patienten die an chronischer Bronchitis oder Asthma leiden, dürfen niemals mit einem Pulverstrahlgerät behandelt werden. Patient und Bediener müssen Augenschutz tragen. Der Bediener muss eine Maske und Handschuhe tragen. Hochleistungs-Absauggerät verwenden. Geben Sie Vaseline auf die Lippen des Patienten. Nur für den zahnärztlichen Gebrauch. Behälter geschlossen halten. Vor Gebrauch gut schütteln!

Gutachten

Unsere Produkte sind nach den neuesten Methoden wissenschaftlich untersucht und getestet. Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage Kopien unserer Tests und Prüfberichte zu.

Hersteller

PRISMAN GmbH
Otto-Hahn-Ring 6-18
D - 64653 Lorsch
Tel.: 06251/866 980-0



MP Klasse I