




Produktdatenblatt/Gebrauchsanweisung Medizinische Einmalhandschuhe

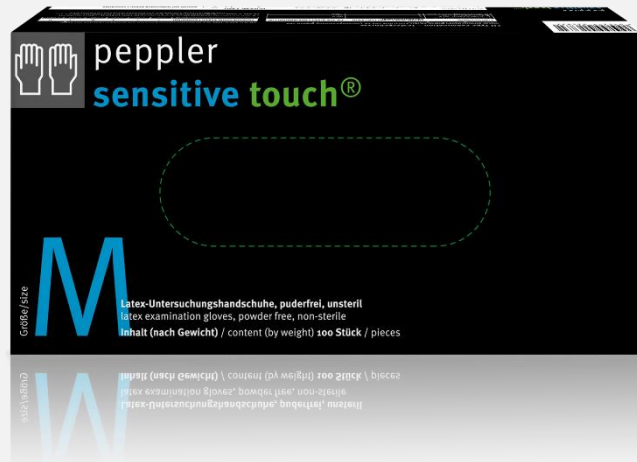

peppler sensitive touch®

201

Produktbeschreibung

Medizinischer Einmalschutzhandschuh aus Latex:
naturweiß, Außenseite chloriniert, thiuramfrei, puderfrei, Rollrand, mikrorau



Dieses Produkt enthält Naturlatex,
welches unter Umständen allergische Reaktionen hervorrufen kann.

Verwendungszweck

Gem. Verordnung (EU) 2017/745: Medizinprodukt der Klasse I



Untersuchungshandschuhe aus Latex,
puderfrei, nicht steril, beidhändig tragbar.

Gem. Verordnung (EU) 2016/425: PSA Kat. III



Einmalschutzhandschuhe
(zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Gefährdung)

Normen

DIN EN ISO 420, DIN EN 455, DIN EN ISO 374, DIN EN 16523

Information und Kennzeichnung



Siehe Spenderbox und Zusatzinformationen

VERTRIEB DURCH

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

TELEFON

DE: 0641-952 05-99
AT: 01-470 17 06

WEB

www.peppler.de
www.peppler.at

Testergebnisse

| | |
|--------------------------|-----------|
| Proteingehalt | < 50 µg/g |
| AQL | 1.5 |
| Chemikalienbeständigkeit | Typ B |
| Reißkraft | min 6 N |
| Lebensmittelkontakt | geprüft |
| Dermatest® | sehr gut |



Gewicht und Wanddicke

Größe M (7-8): median 6.8 g ± 0.3 g

Handfläche: median 0.14 mm ± 0.03 mm

Abmessungen (Handschuhbreite) und erhältliche Größen

| | | |
|----|------|----------------|
| XS | 5-6 | 75 mm ± 10 mm |
| S | 6-7 | 80 mm ± 10 mm |
| M | 7-8 | 95 mm ± 10 mm |
| L | 8-9 | 110 mm ± 10 mm |
| XL | 9-10 | 115 mm ± 10 mm |

Handschuhlänge ≥ 245 mm

Lagerung

Kühl und trocken in der Originalverpackung lagern, keine übermäßige Hitze und Sonneneinstrahlung.

Lagerung bei 10-40°C.



Inhalt pro Spenderbox und Transportkarton (nach Gewicht)

Größen XS-XL: 100 Stück pro Spenderbox

10 Spenderboxen pro Transportkarton

Herstellungsland und Haltbarkeit ab Herstellungsdatum

Malaysia

3 Jahre

Entsorgungshinweis



Entsprechend den gültigen Vorschriften für das Handschuhmaterial entsorgen. Verunreinigte Handschuhe den örtlichen Vorschriften folgend für die entsprechende Substanz entsorgen.

VERTRIEB DURCH

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

TELEFON

DE: 0641-952 05-99
AT: 01-470 17 06

WEB

www.peppler.de
www.peppler.at

Zusatzinformationen

Dieses Produkt wurde gemäß EN ISO 374-1:2016+A1:2018 und EN 420:2003+A1:2009 geprüft und erfüllt die folgenden Leistungsstufen:

| Prüfchemikalie | EN 16523-1:2015 +A1:2018 Permeationslevel | EN 374-4:2013 Degradation (%) |
|---------------------------|--|----------------------------------|
| K: Natriumhydroxid 40% | 6 | -20,4 |
| L: Schwefelsäure 96% | 1 | 96,4 |
| T: Formaldehyd 37% | 6 | 16,5 |
| P: Wasserstoffperoxid 30% | 5 | -47,3 |

EN ISO 374-1:2016

Typ B



Typ B:

Die Permeationsleistung muss mindestens Stufe 2 gegen wenigstens drei Prüfchemikalien entsprechen.

Die Permeationslevel basieren auf Durchbruchzeiten gemäß EN ISO 374-1:2016+A1:2018 wie folgt:

| Leistungsstufe gegen Permeation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Gemessene Durchbruchzeit (min) | > 10 | > 30 | > 60 | > 120 | > 240 | > 480 |

EN ISO 374-4:2013:

Die Degradationsstufen geben die Änderung der Durchstichfestigkeit der Handschuhe nach Kontakt mit der beanspruchenden Chemikalie an.

EN 16523-1:2015:

Die Permeation beschreibt den Bewegungsvorgang einer Chemikalie durch das Material des Schutzhandschuhs auf molekularer Ebene.

EN ISO 374-5:2016



Geprüft auf Widerstand gegen Penetration gemäß EN ISO 374-2:2014

Widerstand gegen Bakterien und Pilze: **bestanden**

Widerstand gegen Viren: **bestanden**

Die Penetration wurde unter Laborbedingungen bewertet und bezieht sich nur auf die geprüften Proben.

VERTRIEB DURCH

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

TELEFON

DE: 0641-952 05-99
AT: 01-470 17 06

WEB

www.peppler.de
www.peppler.at

Information und Achtung



Enthält Restchemikalien, die allergische Reaktionen hervorrufen können.

Dieses Produkt enthält Naturlatex und kann allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen.

Diese Information macht keine Angaben zur tatsächlichen Schutzdauer am Arbeitsplatz und zur Unterscheidung von Gemischen und reinen Chemikalien.

Der Widerstand gegen Chemikalien wurde unter Laborbedingungen an Proben beurteilt, die lediglich von der Handinnenfläche entnommen wurden und bezieht sich ausschließlich auf die geprüften Chemikalien. Er kann anders sein, wenn die Chemikalie in einem Gemisch verwendet wird.

Es wird eine Überprüfung empfohlen, ob die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Degradation von denen der Typprüfung abweichen können.

Wurden Schutzhandschuhe bereits verwendet, können sie aufgrund von Veränderungen ihrer physikalischen Eigenschaften geringeren Widerstand gegen gefährliche Chemikalien bieten.

Durch bei Berührung mit Chemikalien verursachte Degradation, Bewegungen, Fadenziehen, Reibung usw. kann die tatsächliche Anwendungszeit wesentlich reduziert werden.

Bei aggressiven Chemikalien kann die Degradation der wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl von gegen Chemikalien beständigen Handschuhen zu berücksichtigen ist.

Vor der Anwendung sind die Handschuhe auf jegliche Fehler oder Mängel zu überprüfen.



Nur für die einmalige Verwendung bestimmt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Qualitätsprodukten.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an!

Unsere MedizinprodukteberaterInnen helfen Ihnen gerne weiter.

DE: 0641-95205-99

AT: 01-47017-06

E-Mail: info@peppler.de



peppler.de

VERTRIEB DURCH

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

TELEFON

DE: 0641-952 05-99
AT: 01-470 17 06

WEB

www.peppler.de
www.peppler.at