

Produktdatenblatt Reinigerkonzentrat

Stand: 2020-03-12

peppler.de



- ✓ Entfernt wirksam Ablagerungen in der Absauganlage
- ✓ Sehr gute Reinigungsleistung bei guter Materialverträglichkeit
- ✓ Schaumarmes Reinigungskonzentrat
- ✓ Verhindert und entfernt wirksam neue Belagsbildung und Verstopfung

peptol R

Art-Nr.: 28560R

Anwendungsbereich

Dieses schaumarme Reinigungskonzentrat reinigt effektiv zahnärztliche Absauganlagen inkl. deren Abflussleitungen. Durch regelmäßige Anwendung werden Belagsbildung und Verstopfungen vermieden bzw. vorhandene Ablagerungen aufgelöst. peptol R entfernt wirksam Biofilme und Ablagerungen in der Absauganlage bei sehr guter Materialverträglichkeit.

Anwendung

Der Spezialreiniger wird bei Problemfällen als 10 %ige Lösung angewendet. Die Einwirkzeit liegt bei 1-2 Stunden.

Bei regelmäßiger Anwendung wird der Reiniger als 5 %ige Lösung 1-2mal wöchentlich für 30 min. angewendet.

Über die Saugschläuche werden 2 Liter der 5 %igen peptol R Gebrauchslösung durchgesaugt (dies entspricht 1 Dosierkappe in 2 l Wasser). Nach der Einwirkzeit wird die Anlage mit einem Liter Wasser nachgespült.

Handschuhe und Schutzbrille tragen!

Verdünnungstabelle

| Gebrauchsfertige Lösung | 5,0 %ig | 10,0 %ig |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 Liter | 50 ml Konz. 950 ml Wasser | 100 ml Konz. 900 ml Wasser |
| 2 Liter | 100 ml Konz. 1900 ml Wasser | 200 ml Konz. 1800 ml Wasser |
| 3 Liter | 150 ml Konz. 2850 ml Wasser | 300 ml Konz. 2700 ml Wasser |
| 5 Liter | 250 ml Konz. 4750 ml Wasser | 500 ml Konz. 4500 ml Wasser |
| 10 Liter | 500 ml Konz. 9500 ml Wasser | 1000 ml Konz. 9000 ml Wasser |

Zusammensetzung / wirksame Bestandteile

Inhaltsstoffe nach VO 648/2004/EG

< 5% amphotere Tenside

< 5% Phosphonate

Chemisch-physikalische Daten

| | |
|----------------|-----------------------|
| Dichte | 1,2 g/cm ³ |
| pH-Wert | < 2 |

Lieferformen

2,5 l Flasche

Duftvarianten

neutral

Sicherheitshinweise

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Nach Gebrauch gründlich waschen. Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.



Achtung

Hersteller

Prisman GmbH
Otto-Hahn-Ring 6-18
D-64653 Lorsch

Tel.: 06251-866980-0